

Oberflächenreinigung und -desinfektion

Alkoholische Feuchttücher zur schnellen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, wie z. B. Turbinen, Hand- und Winkelstücke, Unitgriffe, Schwebetische und medizinische Geräte.



- aldehyd- und phenolfrei
- VAH zertifiziert – Flächendesinfektion mit Mechanik (unter geringer Belastung)
- sehr schnelle Wirkung
- gebrauchsfertig
- fusselfrei



CE 0123

Zusammensetzung

Wirksame Bestandteile:

Ethanol, Propan-2-ol,
Chlorhexidindigluconat,
Trialkylethoxyammoniumpropionat,
Alkylaminderivate

Wirkungsspektrum

Testkriterien: hohe Belastung, Raumtemperatur*

- **bakterizid** 2 Min.
(EN 13727, EN 14561, EN 16615)
- **MRSA** 1 Min.
(VAH-Methode 9)
- **levurozid** 2 Min.
(EN 13624, EN 14562, EN 16615)
- **tuberkulozid** 1 Min.
(EN 14348)

Testkriterien: geringe Belastung, Raumtemperatur*

- **begrenzt viruzid PLUS** 2 Min.
(EN 14476, EN 16777)
gegen unbehüllte Adeno- und Noroviren sowie alle behüllten Viren, z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza- und Coronaviren

Testkriterien: ohne Belastung, Raumtemperatur*

- **begrenzt viruzid** 30 Sek.
(RKI/DVV)
gegen behüllte Viren, z. B. HBV, HCV, HIV, Influenza- und Coronaviren

* Vorreinigung: gemäß RKI-Empfehlung sollten sichtbar verschmutzte Oberflächen vorgereinigt werden.

Anwendungsgebiet

MinutenWipes dienen zur schnellen Desinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten, Schwebetischen, Unitgriffen, medizinischen Geräten, Bedienungstasten, Hand- und Winkelstücken, Turbinen etc.

Anwendung nur auf alkoholverträglichen Oberflächen!

Aufbereitung der Spenderbox inkl. Deckel siehe Aufbereitungsanleitung.

Anwendung nur durch medizinisches Fachpersonal mit entsprechender Schutzkleidung.

Gutachten

Dr.Brill + Partner GmbH:

- MRSA, 2009-07
EN 14561 (bakterizid), 2009-06
- EN 14562 (levurozid), 2009-06,
- Langzeit/ Remanenz, 2008-01

Technische Mikrobiologie

Dr. Jutta Höffler GmbH:

- EN 1040 (bakterizid), 2009-05
- EN 1275 (levurozid), 2009-04
- EN 1276 (bakterizid), 2009-04

Prof. DDR. E. Marth:

- DGHM; 2002-07

Prof. Dr. R. Schubert:

- VAH (bakterizid, levurozid), 2006-05

Oberflächenreinigung und -desinfektion

HygCen Germany GmbH:

- VAH (bakterizid, levurozid), 2009-09
- EN 16615, 4-Felder Test (bakterizid, levurozid), 2016-06
- EN 13624 (levurozid), 2017-08
- EN 13727 (bakterizid), 2017-08
- begrenzt viruzid PLUS EN 14476, 2017-08
- EN 14348 (tuberkulozid), 2019-06
- DVV (Carriertest 2012), 2013-11

Mikrolab GmbH:

- begrenzt viruzid (RKI/DVV) gegen behüllte Viren, 2009-08

Labor Enders:

- EN 14476 begrenzt viruzid PLUS, 2019-07
- EN 16777 begrenzt viruzid PLUS, 2019-07

Iki – Institut für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle GmbH:

- EN 16615 (bakterizid, levurozid), 2019-10
- VAH inkl. EN 16615 (bakterizid, levurozid), 2019-11

HygCen Austria GmbH:

- EN 16615 (bakterizid), 2021-05

Gutachten und Freigaben können in besonderen Fällen bei uns abgerufen werden.

Haltbarkeit

2 Jahre

Nach dem Öffnen können die MinutenWipes bei ordnungsgemäßigem Verschluss nach vorschriftsmäßigem Gebrauch mindestens **1 Monat** angewendet werden.

Materialverträglichkeit

Nur auf alkoholverträglichen Oberflächen anwenden.

Umwelt

Die Verpackung ist aus einem Verbundmaterial und thermisch verwertbar. Gebrauchte Tücher über den Hausmüll entsorgen. Nicht über das WC entsorgen. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Freigaben

Geprüft von namhaften Dentalgeräteherstellern.

Diverse Material- und Praxistests von namhaften Dentalgeräteherstellern auf Anfrage

Lieferformen

MinutenWipes 30

„cotton touch“ Qualität

REF 3050 StarterSet à 2 Spenderboxen, leer und 2 NF-Beutel à 60 Tücher (30 g/m², 14 x 20 cm)

REF 3051 Karton à 6 Nachfüllbeutel à 60 Tücher (30 g/m², 14 x 20 cm)

MinutenWipes Jumbo 30

„cotton touch“ Qualität

REF 3052 StarterSet à 2 Spenderboxen, leer und 2 NF-Beutel à 100 Tücher (30 g/m², 21 x 26 cm)

REF 3053 Karton à 12 Nachfüllbeutel à 100 Tücher (30 g/m², 21 x 26 cm)

MinutenWipes 50

„cotton touch“ Qualität

REF 4709 StarterSet à 2 Spenderboxen, leer und 2 NF-Beutel à 40 Tücher (50 g/m², 14 x 20 cm)

REF 4710 Karton à 6 Nachfüllbeutel à 40 Tücher (50 g/m², 14 x 20 cm)

MinutenWipes Jumbo 50

„cotton touch“ Qualität

REF 4713 StarterSet à 2 Spenderboxen, leer und 2 NF-Beutel à 70 Tücher (50 g/m², 21 x 26 cm)

REF 4712 Karton à 12 Nachfüllbeutel à 70 Tücher (50 g/m², 21 x 26 cm)

Oberflächenreinigung und -desinfektion

MinutenWipes Maxi

„cotton touch“ Qualität

REF 4747 StarterSet à 1 Spenderbox,
leer und 1 NF-Beutel
à 250 Tücher
(50 g/m², 17 x 26 cm)

REF 4714 Karton á 4 Nachfüllbeutel
à 250 Tücher
(50 g/m², 17 x 26 cm)

Zubehör

REF 4602 Wandhalter
(runde Spenderboxen)
für JumboWipes 30 und 50

REF 4603 Wandhalter
(eckige Spenderboxen)
für MaxiWipes

REF 4690 Deckel, eckig
für MaxiWipes Spenderbox

REF 4692 Spenderbox, eckig
für MaxiWipes