

INSTRUMENTE / INSTRUMENTENPFLEGE

SPEZIAL ÖLSPRAY



ÖLSPRAY AUF BASIS MEDIZINISCHER WEISSÖLE ZUR SCHMIERUNG BEWEGLICHER
TEILE VON INSTRUMENTEN UND MEDIZINPRODUKTEN

1 / 3



INSTRUMENTE / INSTRUMENTENPFLEGE

SPEZIAL ÖLSPRAY



PRODUKTBESCHREIBUNG

2 / 3

SPEZIAL ÖLSPRAY auf Basis reiner medizinischer Weißöle ist äußerst materialverträglich gegenüber gängigen Materialien wie z. B. Gelenke und Hähne von starren Endoskopen, sowie Turbinen oder Hand- und Winkelstücke oder chirurgische Instrumente wie Zangen oder Scheren. Darüberhinaus entspricht das Weißöl dem Qualitätsstandard DAB (Deutsches Arzneibuch).

Das spezielle Sprühventil sorgt für einen feinen, gleichmäßigen Schutzfilm. Dieser bedingt die hohe Dampfdurchlässigkeit von **SPEZIAL ÖLSPRAY** und erlaubt eine sichere Sterilisation im Dampfsterilisator. **SPEZIAL ÖLSPRAY** erhöht die Werterhaltung der Materialien durch eine passende Schmierung beweglicher Teile und einen wirksamen Korrosionsschutz.

ANWENDUNGEN UND HINWEISE

Anwendung

Nur zur professionellen Anwendung. Turbinen oder Hand- und Winkelstücke zweimal täglich bzw. vor jedem Autoklavieren mit **SPEZIAL ÖLSPRAY** ca. 1 Sek. durchsprühen. Überschüssiges Öl abwischen. Dose dabei senkrecht halten. Instrumente: Im halb geöffneten Zustand aus ca. 25 cm Entfernung einsprühen. Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender / Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender / Patient niedergelassen ist, zu melden.

Anwendungshinweise

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Unbedingt Abstand einhalten und nur einen dünnen Ölfilm aufsprühen.

Zusammensetzung

Medizinisches Weißöl (Paraffinum perliquidum) nach DAB (Deutsches Arzneibuch), Treibgas Propan/Butan.

Materialverträglichkeit

SPEZIAL ÖLSPRAY kann bei Latex- und Gummiteilen Quellung verursachen.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Vor Gebrauch Etikett lesen.

INSTRUMENTE / INSTRUMENTENPFLEGE

SPEZIAL ÖLSPRAY



GEBINDE

3 / 3

Produkt	Gebinde	VE	Inhalt	Art. Nr.	PZN
SPEZIAL ÖLSPRAY	300 ml Spraydose	12	300 ml	00-108-003	20350417

Nationale Angaben können abweichen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unsere Niederlassung oder den Händler vor Ort.



ZERTIFIZIERUNGEN



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.